

# Bruksanvisning

## IRIS

Mottaker med display, lys, lyd, og tale

**B-DISe**

HMS art.nr. 162286



2010-12-29  
Dok.nr.: 0304A

# Innholdsfortegnelse

<b>Innledning</b> .....	<b>3</b>
Dette bør du lese.....	3
Rekkevidde.....	3
<b>Iris-pakken inneholder</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiledning for bruker</b> .....	<b>5</b>
<b>Daglig bruk av Iris</b> .....	<b>5</b>
Varslingsmåter og indikatorer.....	5
Lydstyrke / volumkontroll.....	5
<b>Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sendere</b> .....	<b>6</b>
<b>Meldinger om bortfall av ladestrøm – BACKUP2 installert</b> .....	<b>6</b>
<b>Veiledning for personell</b> .....	<b>7</b>
<b>Nødvendige innstillinger før bruk</b> .....	<b>7</b>
Stille inn huskode.....	7
<b>Velge funksjoner</b> .....	<b>8</b>

---

## Teknisk informasjon

### **Produsent**

Vestfold Audio AS  
Nordre Fokserød 12  
3241 Sandefjord  
www.vestfoldaudio.no

### **Tekniske spesifikasjoner**

Bruksområde: Innendørs.  
Batterieliminator: 230VAC/15VDC  
Strømforbruk: Mindre enn 1 watt i hvilestilling.

### **Advarsler i forbindelse med bruk**

Iris er designet for innendørs bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs.

### **Vedlikehold som kan utføres av bruker**

Iris er vedlikeholdsfri.

### **Rengjøring som kan utføres av bruker**

Du kan tørke av Iris *utvendig* med en fuktig, godt opp-vridd klut med mildt såpevann.

### **Lagring når ikke i bruk**

Oppbevares på et tørt sted.

### **Utfyllende om feilindikasjoner**

Se avsnittet *Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink sendere*.

### **Utfyllende informasjon finnes under**

*Veiledning for Personell*.

### **Returordning**

Defekt produktet skal behandles som EE-avfall og ikke kastes som restavfall.



## Innledning

**FlexiBlink Iris B-DISe** er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert i boligen din. Iris vil varsle deg om så vel daglige hendelser som forhold av mer sikkerhetsmessig art, alt avhengig av hvilke detektor/sendere som er installert. Til daglige hendelser regner vi blant annet varsling av dørklokke og telefon, og sikkerhetsalarmer kan for eksempel være komfyrvakt og røykvarslere.

Iris kommer spesielt til nytte i stuen eller andre steder i boligen hvor du oppholder deg mye av dagen.

Varsling blir utløst når f.eks. FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk. Røykvarsleren sender da straks brannmelding til alle mottaker/varslere i boligen. På lignende måte vil Dørklokkesender og Telefonsender varsle deg når noen ringer på døren eller ringer deg på telefonen.

IRIS melder også fra hvor alarmen er utløst med tekst og tale hvis du vil. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset, men er nyttig også hvis du for eksempel har to inngangsdører med hver sin dørsender.

IRISI B-DISe er identisk med versjon DISe2 hvis den installeres med nødstrømbatteri av typen BACKUP2, og den vil da også varsle ved bortfall av ladestrøm.

Iris er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Det er alt.

### **Dette bør du lese**

Første del av denne bruksanvisningen gir deg en veiledning i daglig bruk av Iris. Vi anbefaler at du setter deg inn i første del av bruksanvisningen (side 5 og 6):

- Oversikt over indikatorer og volumkontroll.
- Daglig bruk av Iris.
- Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sender.
- Melding om bortfall av ladestrøm – BACKUP2 er installert og batterieliminatoren er tatt ut av kontakten.

Andre del av bruksanvisningen (side 7-8) er et tillegg for personell som skal sette opp FlexiBlink i boligen din.

### **Rekkevidde**


Iris kan normalt monteres i enebolig/leilighet, men kan selvsagt også benyttes i andre hus og oppsetninger.

Dersom man har behov for varsling over lengre avstander, kan man bruke FlexiBlink Repeater B-FBR*e*.

## Iris-pakken inneholder



Iris  
B-DISe

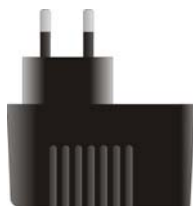

**Batterieliminatør**  
(ledning inkludert)

## Veiledning for bruker

### Daglig bruk av Iris

Batterieliminatoren skal alltid stå i kontakten på veggen. Med volumkontrollen på siden av Iris stiller du inn lydstyrken til daglige hendelser. Ved alarmer, slik som brann, får varslingen full lydstyrke. (Volumkontrollen forbikobles).

### Varslingsmåter og indikatorer

Iris varsler med forholdsvis sterke lysblink, lyd, tale og symboler. Daglige hendelser varsles på en rolig måte og med et lydnivå du selv bestemmer ved justering av volumkontrollen til ønsket nivå. Alarmer har en spesielt oppmerksomhetsvekkende form for varsling, der lydnivået er spesielt høyt.



Når det f.eks. ringer på døren, vil man få kraftige lysblink samtidig som symbol og klartekst vises i displayet. Er talefunksjonen aktivert, vil varslingslyd og tale vekselvis varsle hvilken hendelse som Iris mottar fra detektorer/sendere. Iris melder også hvilken sender som alarmerer, slik at du for eksempel kan lese og høre i hvilket rom brannalarmen kommer fra. På denne måten får du straks vite hva varslingen gjelder.

### Lydstyrke / volumkontroll

Iris vil også varsle deg med lyd og tale. Alminnelige hendelser har rolige lydbilder og kan reguleres i styrke med volumknappen. Alarmer er mer inntrengende og vil alltid bli varslet med full lydstyrke.

Volumknappen er plassert på siden av Iris. Med den kan du bestemme hvor kraftig varslingslyd du ønsker ved alminnelige hendelser (*daglige signaler*). Du får svakere lyd ved å dreie knappen mot venstre.

På siden av Iris finner du også signaluttak for lydoverførings-systemer (teleslynge og FM-anlegg).

## **Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sendere**

Iris vil informere deg når det er på tide å skifte batteri i FlexiBlink sendere som Dørklokkesender/Porttelefonsender, Telefonsender og Røykvarsler. Det gis klar beskjed om hvilken sender eller røykvarsler som melder om dårlig batteri. Det er viktig dersom du har flere røykvarslere installert rundt i huset, men kan også være nyttig hvis du for eksempel har to inngangsdører med hver sin ringeknappsender.

Eks.: Ved dårlig batteri i telefonsender vil Iris vise 'Bytt batteri' samtidig som symbolet for telefon vises i displayet.

Iris B-DISe varsler også om bortfall av ladestrøm i sengevibrator med trådløs ladefeilvarsler..

## **Meldinger om bortfall av ladestrøm – BACKUP2 installert**

Hvis nødstrømsbatteri BACKUP2 er installert og batterieliminatoren tas ut av kontakten i veggen vil Iris straks melde om dette. Er tale aktivert vil den også fortelle om dette med tale.

## Veiledning for personell

### Nødvendige innstillinger før bruk

#### Stille inn huskode

Du finner Huskodebryteren og Funksjonsbryteren bak på Iris.

I FlexiBlink sørger *huskoden* for å varsle **kun** hos deg – og ikke hos dine naboer som også har FlexiBlink –system. Med Funksjonsbryteren kan imidlertid et naboskap gå sammen om å varsle hverandre ved brann og innbrudd. Dette kan du lese mer på neste side under *Velge Funksjoner – Nabovarsling*.

I likhet med alle andre FlexiBlink produkter, har Iris en blå *huskodebryter*. Varslingsanlegget i din bolig bør ha en tilfeldig valgt *huskode*. Den velger du selv. Pass på at alle FlexiBlink detektor/sendere og mottaker/varslere bruker koden du velger, inklusiv Iris.

**NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen.**



**Huskodebryter**  
(fabrikkinnstilling)

Velg nå en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 – 9. Har man FlexiBlink utstyr fra før i boligen, innstilles huskodebryteren til den samme kombinasjonen av bryterne 1 – 9 som det øvrige utstyret i boligen. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Dette gjelder både Iris og det produktet som du eventuelt kopierer huskoden fra.


Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå skal skyve de små bryterne i posisjon.

Etter at du har stilt inn huskoden, bør du vurdere om innstilling av Funksjonsbryteren er nødvendig. Se informasjon om dette på neste side.


## Velge funksjoner

Iris utstyrt med en *funksjonsbryter*. Levert fra fabrikk er alle bryterne *avslått*.

Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart nedenfor.

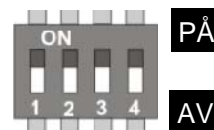


**Funksjonsbryter**  
(fabrikkinnstilling)

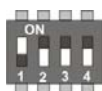

### Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1

Dersom du ønsker at Iris ikke skal varsle deg om dørklokke og telefon, kan du skyve *bryter 1* i stilling *ON* (på).

Iris vil nå kun varsle *alarmer* – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.).

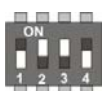

### Nabovarsling – bryter 2

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd i hos naboer som har FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve *bryter 2* i stilling *ON* (på).

Merk: Nabovarsling virker kun dersom alle FlexiBlink produkter involvert er innstilt på *Digital*. Dette gjelder også hos naboer.

NB! Du vil ikke bli varslet når naboer tester røykvarslerne sine.



### Analog/Digital – bryter 3

Stillingen til *bryter 3* i illustrasjonen til venstre kalles *Digital*.

Digital har flere fordeler, som økt informasjonsmengde og -hurtighet. Dersom alle FlexiBlink sendere og mottakere i din bolig har artikkelnummer som ender på *e*, f.eks. DKS3e, TLS2e osv., kan du bruke Digital. Forutsetningen er likevel at alle sendere og mottakere blir satt i stilling *Digital*.

Når bryter 3 er i *av-posisjon*, er Iris *Analog*. Dette er fabrikkinnstillingen. Da vil Iris virke tilfredsstillende med dagens produkter, samt i begrenset grad sammen med våre sendere produsert så langt tilbake som 1993. Dette er *kompatibilitetsinnstillingen*.



### Tale på/av – bryter 4

*Bryter 4* er for å slå tale på/av. Stillingen til *bryter 4* i illustrasjonen til venstre indikerer at tale er slått av. Ved å skyve *bryter 4* i stilling *ON*, settes tale funksjonen på. Da får man varsling med varslingslyd og tale.

### Kombinasjoner av innstillinger

Dersom man har valgt *Digital* med bryter 3, kan man kombinere funksjoner fritt etter behov med bryter 1 og 2.

Dersom man har valgt *Analog* med bryter 3, kan man kun velge funksjoner etter behov med bryter 1.